

Catch the Vision


2ステップ法によるドレナージアクセス時に使用する製品をキット化しました

先端不透過性マーカー付き内腔4Fのイントロデューサは、非血管の手技において、.018"および.035"～.038"径ガイドワイヤーを同時に挿入することが可能なため、ガイドワイヤーの入れ替え時や操作時の逸脱を防止します。イントロデューサには金属製カニューラ付きダイレータをセットしました。

- 穿刺時の視認性に優れたエコー対応針
- 柔軟性と耐久性を兼ね備えた.018"ニチノール製マンドレルワイヤーの先端チップには視認性に優れたプラチナを採用
- ストレートと3mmJのダブルエンドが使用できる.035"ガイドワイヤー
- イントロデューサとダイレータとの段差が少なく、スムーズな挿入が可能



回転可能なガイドワイヤーフープ

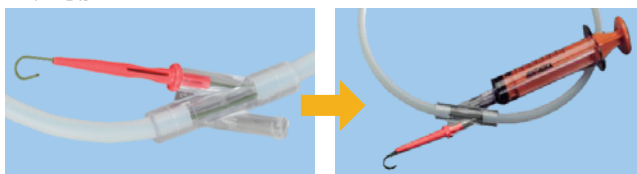

ポートを内側に回してワイヤーをフラッシュし、ワイヤーの取り出しは外側からできます。

※シリンジは別売り

キット内容		ダイレータ		ガイドワイヤー				穿刺針		BowTie GW インサージョン ツール
規 格	径	6 F	7 F	.018"		.035"		21 G		
	長さ	20 cm	15.5 cm	60 cm	80 cm	100 cm		15 cm	20 cm	
	硬さ			フロップイー		SS*	HD**			
	先端形状			ストレート		3 mm J+ストレート				
カタログ 番 号	K12-MAKNV73	●	●	●			●		●	
	K12-MAKNVF1	●	●	●		●		●	●	
	K12-MSS15	●	●		●	●		●		
	K12-MSS20	●	●		●	●			●	
	K12-MHD15	●	●		●		●	●		
	K12-MHD20	●	●		●		●		●	

*スーパースティッフ：コアワイヤー径が.024" **ヘビーデューティ：コアワイヤー径が.017"

包装単位：1

別売り製品

製品名	カタログ番号	穿刺針規格		ガイドワイヤー規格			包装 単位
		21 G	エコー 対応	径と長さ	ワイヤー	先端	
ガイドワイヤー	MAK001N-60	-	-	.018" 径 60 cm長	NT	PI	5
	MAK001N-80	-	-	.018" 径 80 cm長	NT	PI	5