



STAY ON COURSE.

Prelude **ROADSTER**[®]
Guide Sheath




STAY ON COURSE

耐キンク性・圧縮に対する耐久性と容易なシース挿入性の両立、そして高い視認性により、複雑な末梢血管においても、最適な環境を提供出来るように設計されたガイディングシースです。

ターゲット部位へのスムーズな到達性とトラッキング性能

挿入抵抗*
42% 低減

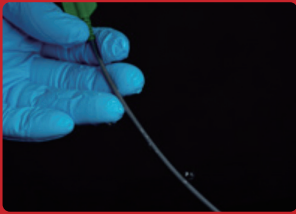

先端側35cmに親水性コーティングを塗布し、血管内での潤滑性を維持

耐キンク性*
33% 向上



ポリエーテルブロックアミド外層にステンレススチールコイルと滑り性の良いPTFEインナーを採用し、キンクの抑制に寄与

圧縮に対する耐久性*
40% 向上



負荷前



負荷をかけている状態

複雑病変やスバズム等による圧縮に対する耐久性を向上



スムーズな挿入

シースの先端とダイレクタの段差を低減し、容易な挿入を実現

視認性

シース先端のエックス線不透過マーカが透視下での適切な位置決めをサポート

人間工学的にデザインされたハブ

シースハブは口径が大きく、取り回しがしやすいデザイン

バルブアダプタ

出血を最小限にし、安全性に貢献。取り外しも可能

ひずみの緩和

挿入時の折れ曲がりを抑えるように考慮された設計


三方活栓

* 従来品との比較

さまざまな解剖学的ニーズに対応する形状とサイズ

Prelude Roadsterは、末梢血管治療のさまざまなニーズに応えるために、複数のサイズと先端形状を提供します。

サイズ展開

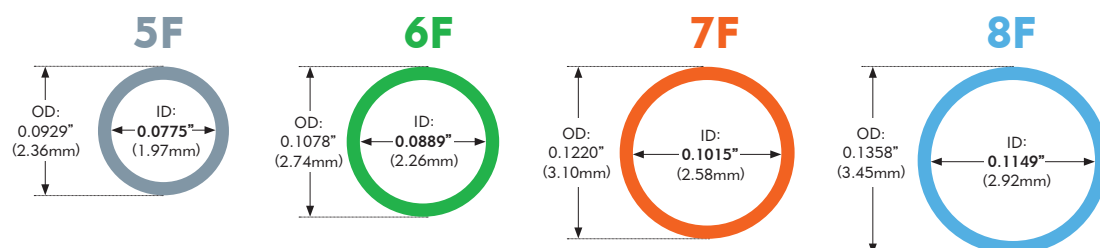

先端形状

異なるアプローチに対応するための3つの先端形状


リーナルダブルカーブ (RDC)

マルチパーパス (MP)

ストレート (S)

有効長

多くのアプローチ部位に到達するための45cm、65cm、90cmのシース

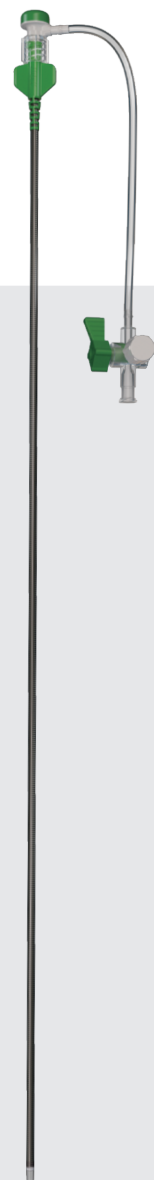

カタログ番号	フレンチ サイズ	シース 有効長	最大GW径	先端形状	シャフトタイプ
PG5F45S	5F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG5F45S018	5F	45 cm	0.018" (0.46 mm)	ストレート	レギュラー
PG5F45MP	5F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	マルチパーパス	レギュラー
PG5F45R	5F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	リーナルダブルカーブ	レギュラー
PG5F90S	5F	90 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG6F45S	6F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG6F45MP	6F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	マルチパーパス	レギュラー
PG6F45R	6F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	リーナルダブルカーブ	レギュラー
PG6F65S	6F	65 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG6F65SX	6F	65 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG6F90SX	6F	90 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG7F45S	7F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG7F45SX	7F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG7F45MP	7F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	マルチパーパス	レギュラー
PG7F45MPX	7F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	マルチパーパス	エクストラスティッフ
PG7F45RX	7F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	リーナルダブルカーブ	エクストラスティッフ
PG7F65SX	7F	65 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG8F45S	8F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	レギュラー
PG8F45SX	8F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG8F45MPX	8F	45 cm	0.038" (0.97 mm)	マルチパーパス	エクストラスティッフ
PG8F65SX	8F	65 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ
PG8F90SX	8F	90 cm	0.038" (0.97 mm)	ストレート	エクストラスティッフ

包装単位: 1

手技全体をサポートする トータルソリューション

穿刺から止血までの各ステップを支える関連製品を幅広くラインアップしています。

Merit MAK™ / Merit S-MAK™

Mini Access Kit
販売名: メリット ミニアクセスキット
医療機器認証番号: 224ADBZX00001000



Impress™

Diagnostic Catheter
販売名: インプレスカテーテル
医療機器届出番号: 22400BZX00075000

basixCOMPAK™

Inflation Device
販売名: メリット ベーシックスコンパック
医療機器届出番号: 13B1X10229MM0004



basixTOUCH™

Inflation Device
販売名: メリット ベーシックスタッチ
医療機器届出番号: 13B1X10229MM0005



PhD™

Hemostatis Valve
販売名: メリット ヘモステシスバルブ
医療機器認証番号: 227ADBZX00092000



DoublePlay™

Hemostatis Valve
販売名: メリット ヘモステシスバルブ
医療機器認証番号: 227ADBZX00092000



FLO40XR™

Hemostatis Valve
販売名: メリット ヘモステシスバルブ
医療機器認証番号: 227ADBZX00092000



ONE Snare™

Endovascular Snare System
販売名: エン スネア システム
医療機器承認番号: 21800BZY10247000



EN Snare®

Endovascular Snare System
販売名: エン スネア システム
医療機器承認番号: 21800BZY10247000



SAFEGUARD™

Hemostatis Device
販売名: メリット セーフガード
医療機器届出番号: 13B1X10229MM0012



PreludeSYNC DISTAL™

Hemostatis Device
販売名: メリット プレリウド SYNC
医療機器届出番号: 13B1X10229MM0019



PreludeSYNC™

Hemostatis Device
販売名: メリット プレリウド SYNC
医療機器届出番号: 13B1X10229MM0019



販売名: メリット プレリウド Roadster
医療機器承認番号: 30700BZX00205000



Understand. Innovate. Deliver.™

製造販売業者

メリットメディカル・ジャパン株式会社

〒163-0539 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル

<https://www.merit.co.jp>

製品ご使用の際は、添付文書あるいは取扱説明書をご確認ください。

©2026 Merit Medical Systems. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners.



■ お問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。
<https://www.merit.co.jp/contact-us/>

